

# Probentransport mit dem Bito Mehrwegbehälter



## Transportverpackung gemäß P650

1. Beutel mit medizinischer Probe, z.B. Blutprobe
2. Kreuzbodenbeutel als Sekundärverpackung mit Saug einlage. Wird mit einer Klammer verschlossen
3. Bitobox, ggf. ausgestattet mit Kühlakkus inkl. Trennvorrichtung und Thermoinsolierung aus EPP

Der Behälter wird mit einem verzahnten Klappdeckel verschlossen. Die ineinander greifenden Zähne in Verbindung mit zwei roten Verschlüssen verhindern ungewolltes transportbedingtes Öffnen.

Deckel bitte schließen und mit Verschlussclip sichern; mit Einmal-Plomben lassen sich die Boxen versiegeln.

## Größen und Varianten

Bito Mehrwegbehälter sind in 4 Größen im Umlauf.

Volumen	Außenmaße (L x B x H) mm	Farbe
25 L	410 x 300 x 340	blau
45 L	610 x 400 x 290	blau
72 L	610 x 400 x 440	blau
101 L	800 x 400 x 423	blau

Der 25-L-Behälter ist für den Trockeneistransport vorgesehen. Regiomed nutzt Mehrwegbehälter ausschließlich mit Thermoinsolierung. Die Boxen sind allerdings auch ohne Thermoinsolierung lieferbar.

Weiterhin können Boxen mit Taschen für Adress-Wendeschilde versehen werden.

**Bitte beachten Sie:** Das Wendeschild muss gedreht werden, die Empfängeradresse sichtbar sein!

